



# EXCELARREST<sup>®</sup> XT

HEMOSTATIC PATCH



**Guía informativa**  
**PARA PACIENTES**

## ¿Qué es el cateterismo cardíaco?

Es un procedimiento en el que se introduce un catéter en una de las cavidades del corazón para realizar una investigación o una cirugía. Al inicio del procedimiento, su médico realizó una pequeña punción con una aguja en la arteria femoral (ubicada en la zona inguinal). Luego colocó una vaina introductora por dicha punción y llegó hasta el vaso sanguíneo. Cuando se completó el procedimiento, profesionales médicos extrajeron la vaina introductora y sellaron el lugar de la punción con ExcelArrest® XT.

## ¿Qué es ExcelArrest® XT?

ExcelArrest® XT es un parche hemostático que utilizan los profesionales médicos para detener el sangrado rápidamente.



**R<sub>x</sub> ONLY**

## ¿Cómo funciona ExcelArrest® XT?

Luego de un cateterismo, debe sellarse la punción que se realiza en el vaso sanguíneo. Luego de extraer la vaina, un técnico o un miembro del personal de enfermería ejerce presión firmemente sobre el lugar con ExcelArrest® XT para acelerar el proceso de coagulación. ExcelArrest® XT utiliza una combinación singular de componentes naturales que absorben el agua de la sangre y concentra los factores coagulantes en el lugar de la punción, lo que acelera el proceso de coagulación natural del cuerpo. El resultado es un método de sellado de la herida efectivo, seguro y rápido.

## ¿Cuándo y cómo retiro mi parche ExcelArrest® XT?

Debe mantener el lugar de la punción seco y limpio durante las primeras veinticuatro horas. Su médico le indicará cuándo puede retirar el parche ExcelArrest® XT de manera segura (generalmente, a las 24 horas). Debe retirar el parche ExcelArrest® XT en la ducha o en la bañera. Al entrar en contacto con agua tibia, el parche ExcelArrest® XT se disolverá lentamente y se volverá resbaladizo. Despegue lentamente el parche del lugar de la punción y deséchelo. Limpie con cuidado el lugar de la punción con agua y jabón. Siga las indicaciones del médico con respecto a las actividades y los medicamentos. Comuníquese con su médico si tiene alguna pregunta.

## ¿Cuándo debo llamar a mi médico?

Preste atención si aparecen indicios de infección e informe a su médico si presenta alguna de las cosas que se relacionan a continuación:

- Hemorragia o drenaje importante en el lugar de la punción
- Hinchazón, enrojecimiento o calor alrededor del lugar de la punción
- Aumento de sensibilidad, adormecimiento o sensación de frío alrededor del lugar de la punción

Es normal que aparezcan una pequeña hinchazón, un moretón y un pequeño bulto debajo de la piel en el lugar de la punción, pero desaparecen dentro de tres a cuatro semanas.

**Un flujo constante de sangre procedente del lugar de la punción se considera una emergencia médica.**

Acuéstese en posición horizontal y ejerza presión sobre el lugar de la punción (el lugar de la hemorragia) hasta que llegue el personal de emergencia.



5000 Township Parkway  
St. Paul, MN 55110  
866-612-2568  
[www.hemostasisllc.com](http://www.hemostasisllc.com)